


Инструкция

к инвалидной коляске для животных FRAKISHTAK «Классическая»

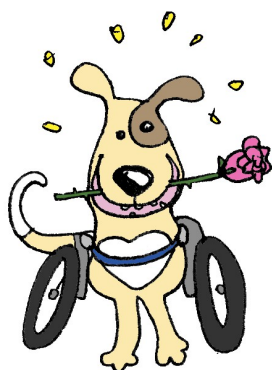

• ВВЕДЕНИЕ



• РЕГУЛИРОВКА КОЛЯСКИ



• ОДЕВАЕМ КОЛЯСКУ



+380 44 362 7100, +380 98 684 3682
+380 99 222 5754, +380 93 546 4991
frakishtak@gmail.com

<http://www.frakishtak.com>

Введение

Уважаемые владельцы домашних животных!

Следующие рекомендации помогут Вам оптимально использовать инвалидную коляску Frakishtak:

- Постепенно приучайте Ваше животное к инвалидной коляске, каждый раз увеличивая длительность прогулки (*Одни адаптируются с первой секунды, другим нужно время, чтобы привыкнуть*).
- Если животное долгое время находилось в неподвижном состоянии из-за болезни, не нагружайте его сразу долгими прогулками. (*Начните с 10-15 минут, затем постепенно увеличивайте время прогулок - и Вы сами определите оптимальное для Вашего питомца время*).
- Для домашних животных, которые восстанавливают подвижность, мы рекомендуем ежедневно использовать инвалидную коляску Frakishtak, как тренажер.



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЖИВОТНОЕ В КОЛЯСКЕ БЕЗ ПРИСМОТРА!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВЕТЕРИНАРОМ!

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, звоните нам на номера, указанные в данном руководстве.

Делитесь с нами достижениями Вашего любимца в коляске Frakishtak:

присылайте на наш e-mail рассказы, фото и видео, которые мы опубликуем на наших страницах в социальных сетях и форумах.



Благодарим Вас за покупку
и ждем обратной связи!

С Уважением,
команда Frakishtak

Регулировка коляски

Отрегулируйте коляску так, чтобы рама коляски проходила вдоль тела животного горизонтально полу.

На фото показано правильное положение коляски




Регулировки коляски осуществляются следующими манипуляциями:


- Высота. Переставьте колеса в необходимое отверстие.



- Застежки (фастексы) на передней шлее должны находиться за передней лапой, примерно 2 см от подмышки. Чтобы отрегулировать это расстояние необходимо:
 - выкрутить гайки "барашки", передвинуть раму на необходимое расстояние, вкрутить "барашки"

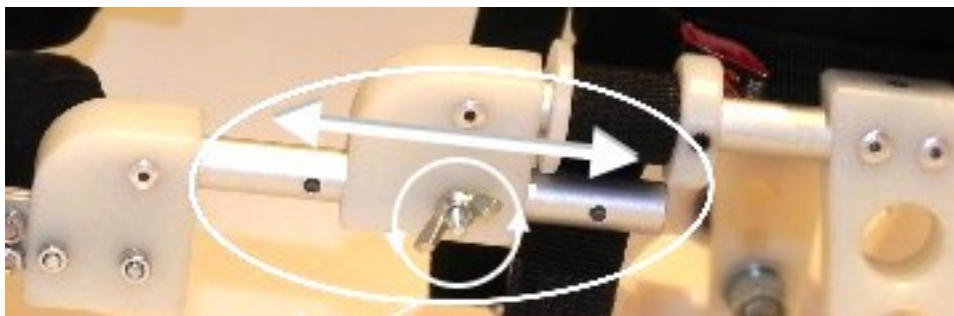

- Отрегулируйте ремни на амуниции. Амуниция не должна давить или болтаться.

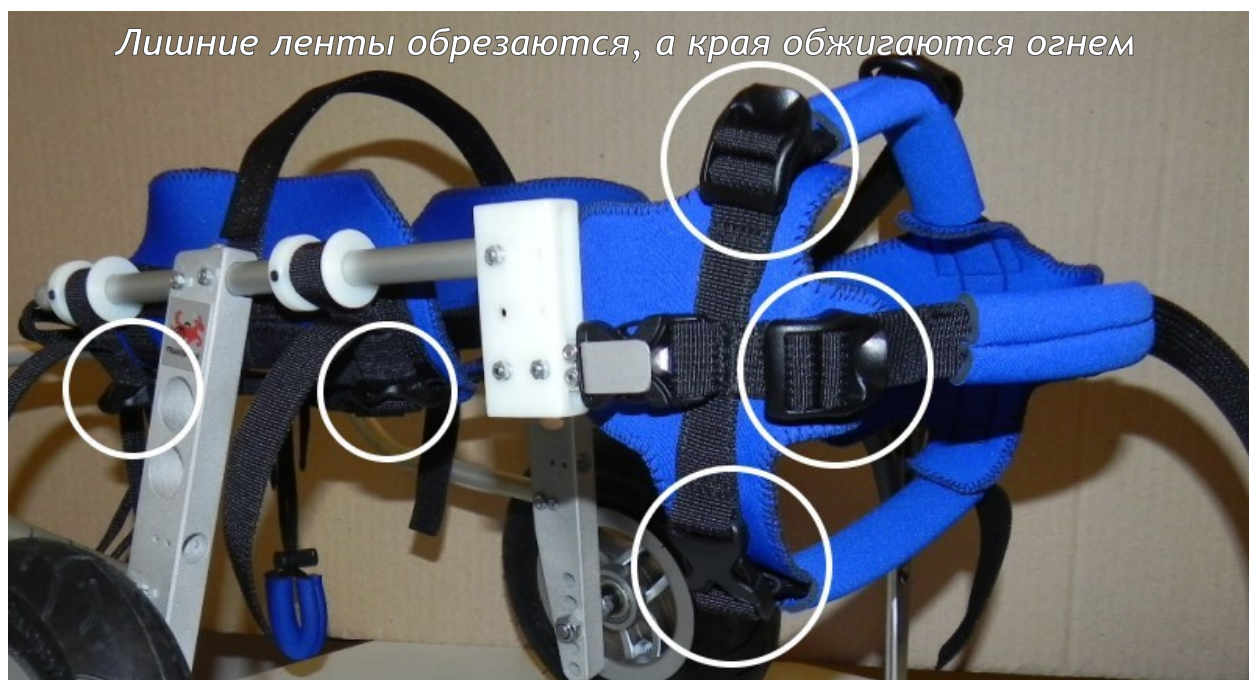

- При необходимости, задние лапы помещаются в стремяна. Отрегулируйте необходимую высоту и затяните шнуры.




Мягие стремяна из аэропрена
для фиксации не работающих лап


ОДЕВАЕМ КОЛЯСКУ

ШАГ 1


- Проденьте шлею через голову. Часть шлеи с кольцом для поводка должна находиться на холке.

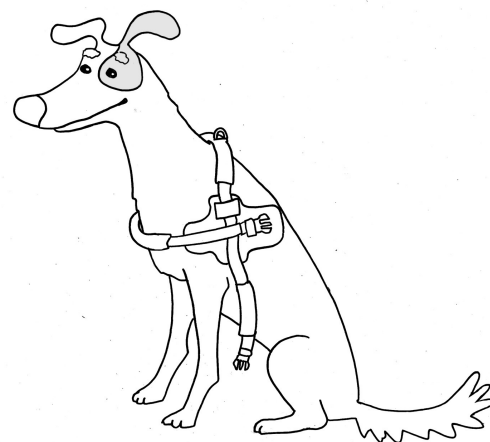

- Ленту с застежкой (фастексом) заведите за передними лапами и застегните.

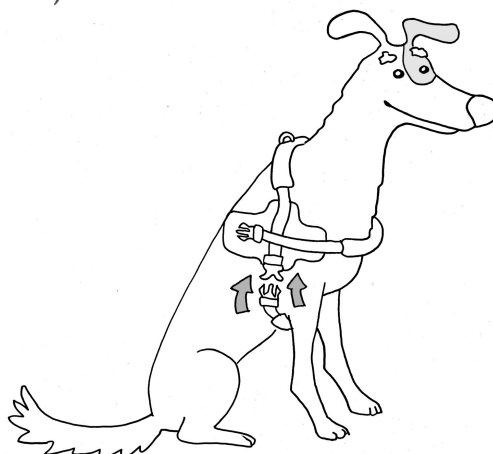

ШАГ 2

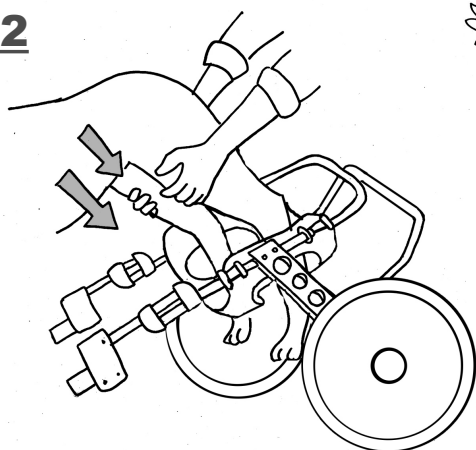

Заведите коляску сзади животного и проденьте в седло задние лапы.

ШАГ 3

Поднимите коляску в горизонтальное положение и соедините части застежек (фастексом) на шлее и на коляске

